

PATIENTINFORMATION – GASTROPANEL- UNDERSÖKNING

En GastroPanel-undersökning har planerats för Er.

Före undersökningen bör Ni beakta följande:

- Man får inte äta, dricka eller röka minst fyra timmar före undersökningen
- Undersökningen förutsätter inte att regelbunden medicinering avbryts. Ifall Ni ändå använder något av följande läkemedel och en paus (10 dygn) inte kommer på fråga, bör detta (läkemedel och eventuell paus) meddelas till provtagaren, eftersom användandet kan ha en inverkan på laboratorievärdena:

PROTONPUMPSHÄMMARE:

Esomeprazol; ESOMEPRAZOL ORION, ESOMEPRAZOL RATIOPHARM, ESOMEPRAZOL SANDOZ, NEXIUM, NEXIUM 10 mg enterogranulat till oral suspension

Lansoprazol; GASTERIX, LANSOPRAZOL ACTAVIS 15 mg, ZOLT

Omeprazol; LOSEC, LOSEC MUPS, OMEPRAZOL ACTAVIS, OMEPRAZOL PENZA, OMEPRAZOL RATIOPHARM, OMEPRAZOL SANDOZ, OMESTAD

Pantoprazol; PANTOPRAZOL ACTAVIS, PANTOPRAZOL PENZA 20 mg enterotabletter, PANTOPRAZOL PENZA 40 mg enterotabletter, PANTOPRAZOL SANDOZ, PANZOR, SOMAC CONTROL, SOMAC enterotabletter, SOMAC pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Rabeprazol; PARIET

Med vänliga hälsningar
Biohit Laboratorietjänster
Tel. +358 400 603 222

08022017